




Biosynex Streptop A

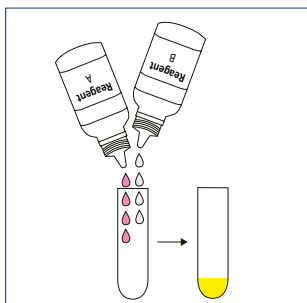


1 Lisää uuttoputkeen 4 tippaa reagenssia A. Reagenssi A on väriltään punaista. Lisää uuttoputkeen 4 tippaa reagenssia B. Sekoita liuos pyörittämällä varovasti uuttoputkea. Liuoksen väri muuttuu keltaiseksi.

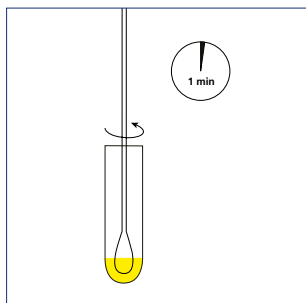

2 Ota nielunäyte pak-kauksen sisältyvällä näytteenottotikulla ja laita näytteenottotikku keltaista liuosta sisältävään uuttoputkeen. Sekoita liuosta näytteenottotikulla pyörittämällä sitä vähintään 10 kertaa. Jätä tikku uuttoputkeen vähintään 1 minuutiksi.

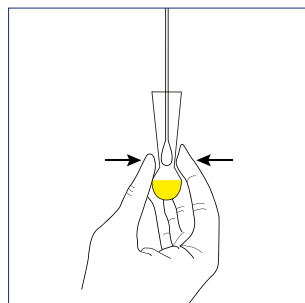


3 Purista neste pois näytteenottotikusta pyörittämällä tikkua putken sisäpintaa vasten ja puristamalla putkea samalla, kun vedät näytteenottotikun pois putkesta. Hävitä tikku.

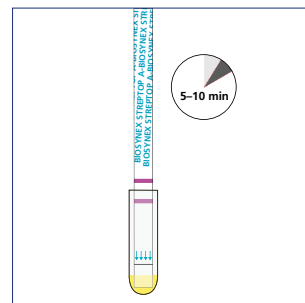


4 Upota testiliuska uuttoputkeen siten, että liuskan nuolet osoittavat alaspäin, ja käynnistä ajastin. Lue tulos 5 minuutin kuluttua. Testin tulos tulee lukea viimeistään 10 minuutin kuluttua.

Tulosten tulkinta

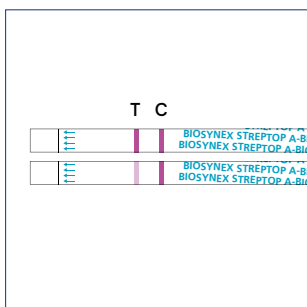


Positiivinen tulos

Näkyviin tulee kaksi erillistä punaista viivaa. Yhden viivan tulee olla testialueella (T) ja toisen viivan kontrollialueella (C).

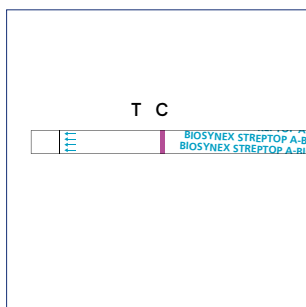

Negatiivinen tulos

Kontrollialueelle (C) tulee näkyviin yksi punainen viiva.

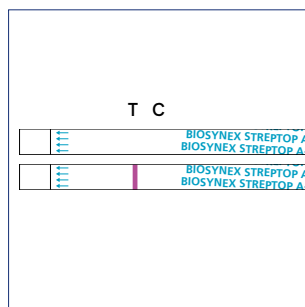

Virheellinen tulos

Näkyviin ei tule kontrolliviivaa. Kertaa toimintaohjeet ja toista testi uudella testiliuskalla. Jos ongelma ei poistu, lopeta testipakkauksen käyttö.

Tutustu
käyttöohjeisiin
ennen testin
suorittamista.

Biosynex Streptop A

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Näytteenotto ja näytteen valmistelu

- Ota nielunäyte kurkusta pakkaukseen sisältyvällä steriilillä vanutikulla.
- Stuart- ja Amies-elatusaineessa kuljetettuja näytteitä voi käyttää.
- Testaus tulee suorittaa **välittömästi** näytteenoton jälkeen. Nielunäyte voidaan säilyttää kuivassa säiliössä **huoneenlämmössä (15–30°C:ssa) korkeintaan neljä tuntia** tai **2–8°C:ssa korkeintaan 24 tuntia** ennen testin suorittamista.

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / 050 380 9684

Tilaukset: tilaukset@aidian.fi

www.aidian.fi

Tuote	Tuotenr.	Tilausnr.
Biosynex Streptop A dipstick, 20 testiä	1030018	138886