




Biosynex Strep A

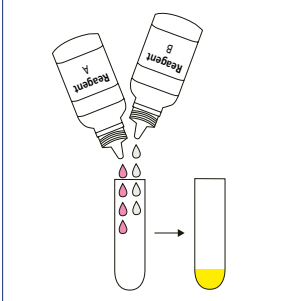


1 Lisää neljä tippaa reagenssia 1 uuttoputkeen. Reagenssi 1 on väriltään punaista. Lisää neljä tippaa reagenssia 2 uuttoputkeen. Sekoita liuos pyörittämällä varovasti uuttoputkea. Liuoksen väri muuttuu keltaiseksi.

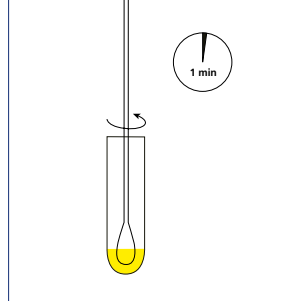

2 Ota nielunäyte pak-kaukseen sisältyvällä näytteenottotikulla ja laita se keltaista liuosta sisältävään uuttoputkeen. Pyöritä tikkua 15 kertaa putken pohjaa vasten voimakkaasti sekoittaen.

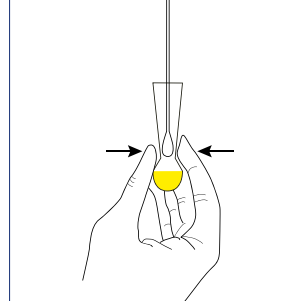


3 Purista neste pois näytteenottotikun päästä pyörittämällä näytteenottotikkua putken sisäpintaa vasten ja puristamalla putkea samalla, kun vedät näytteenottotikun pois putkesta. Hävitä näytteenottotikku. Inkuboi liuosta vähintään yhden (1) minuutin ajan, mieluummin 5 minuuttia.

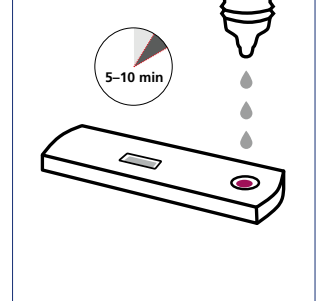


4 Laita uuttoputkeen tippakaräki. Avaa testikasetin foliopussi ja aseta testikasetti tasaiselle pinnalle. Tiputa uuttoputkesta 3 tippaa liuosta näytekuppaan. Lue tulokset 5 minuutin kuluttua. Testin tulos tulee tulkita viimeistään 10 minuutin kuluttua.


Tulosten tulkinta

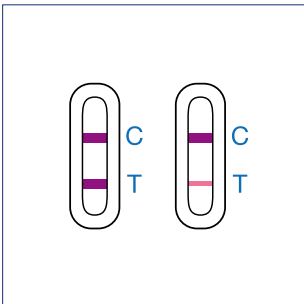

Positiivinen tulos
Kaksi selvästi erottuvaa punaista viivaa tulee näkyviin. Toinen viiva näkyy testialueella (T) ja toinen kontrollialueella (C).

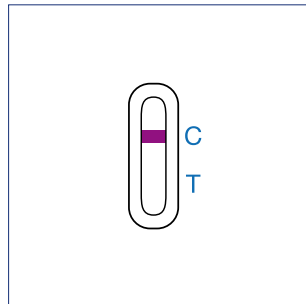

Negatiivinen tulos
Yksi punainen viiva näkyy kontrollialueella (C). Testin (T) viiva-alueella ei näy viivaa.

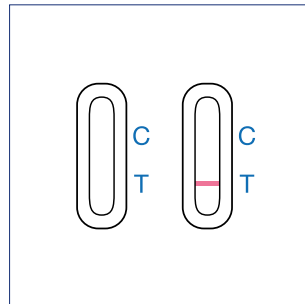

Virheellinen tulos
Kontrolliviiva ei tule näkyviin. Tarkista testimenetelmä ja toista testi. Jos ongelma ei poistu, lopeta testipakkauksen käyttö.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

Biosynex Strep A

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Näytteenotto ja näytteen valmistelu

- Ota nielunäyte kurkusta pakkaukseen sisältyvällä steriilillä vanutikulla.
- Stuart- ja Amies-elatusaineessa kuljetettuja näytteitä voi käyttää.
- Testaus tulee suorittaa **välittömästi** näytteenoton jälkeen. Nielunäyte voidaan säilyttää kuivassa säiliössä **huoneenlämmössä (15–30°C:ssa) korkeintaan neljä tuntia** tai **2–8°C:ssa korkeintaan 24 tuntia** ennen testin suorittamista.

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi

050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy,

puh. 020 112 1510 tai

asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi

Tuote	Tuotenro.	Tilausno., Mediq Suomi
Biosynex Strep A, 20 testiä	148674	1701572