



Biosynex hCG Cassette Combo

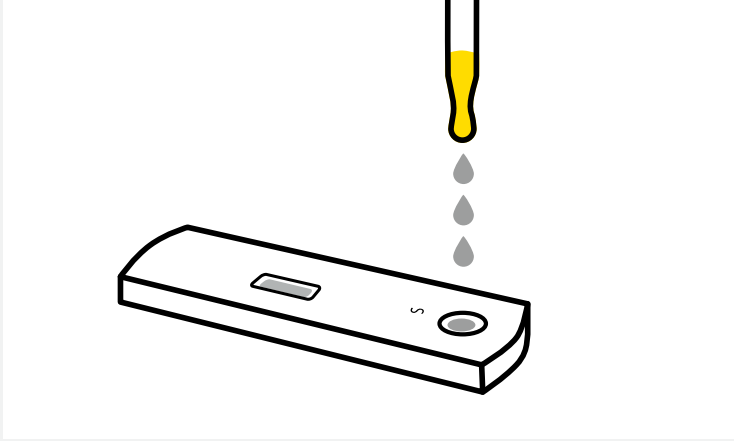


1 Annostele 3 tippaa (virtsa-, seerumi- tai plasma-) näytettä kasetin näytesyvennykseen (S). Käynnistä ajastin. Lue virtsanäytteen tulos 3 minuutin kuluttua ja plasman tai seerumin tulos 5 minuutin kuluttua. Tulos tulee tulkita viimeistään 10 minuutin kuluttua.

Tulosten tulkinta

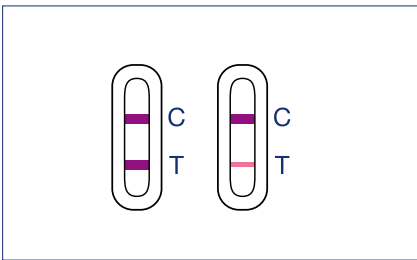


Positiivinen tulos

Kaksi selvästi erottuvaa värillistä viivaa tulee näkyviin. Toisen viivan tulee näkyä kontrolliviiva-alueella (C) ja toisen testiviiva-alueella (T).

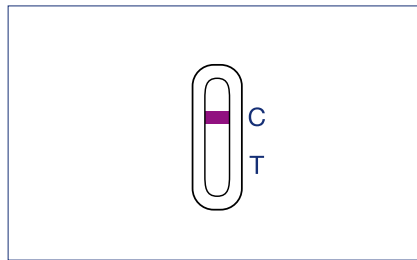

Negatiivinen tulos

Yksi värillinen viiva näkyy kontrolliviiva-alueella (C). Selvää värillistä viivaa ei näy testiviiva-alueella (T).

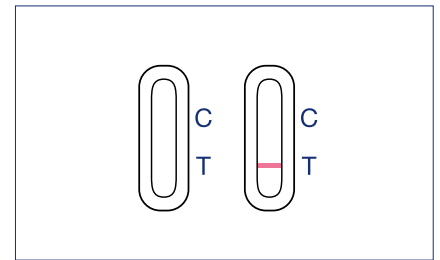

Virheellinen tulos

Kontrolliviiva (C) ei tule näkyviin. Riittämätön näytemäärä tai virheellinen menettely ovat todennäköisimmät syyt kontrolliviivan puuttumiseen.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

Biosynex hCG Cassette Combo

Ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten *in vitro* diagnostiikka -käyttöön.

Varotoimet, näytteen ottaminen ja käsittely

- Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Testin on oltava suljetussa pussissa käyttöön saakka.
- Hyvin alhaiset hCG-pitoisuudet voivat tuottaa heikon testiviivan (T), jos lukuaika ylittää 10 minuuttia. Alhaisia hCG-pitoisuuksia voi esiintyä ei-raskaana olevilla naisilla.
- Biosynex hCG Cassette Comboa käytetään virtsa-, seerumi- tai plasmanäytteiden analysointiin.
- Tee testaus välittömästi näytteenoton jälkeen. Näytteitä voidaan säilyttää **2–8°C:n** lämpötilassa korkeintaan **48 tuntia**.
- Pidempää säilytystä varten säilytä alle **-20°C:n** lämpötilassa **12 kuukautta**. Älä jäädytä/sulata näytteitä yli 3 kertaa. Lämmitä näyte huoneenlämpöiseksi ennen testausta.

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi

050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy,

puh. 020 112 1510 tai

asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi

Tuote	Tuotenro.	Tilausno., Mediq Suomi
Biosynex hCG Cassette Combo, 40 testiä	148919	1701570