



# Biosynex Amnioquick Duo +

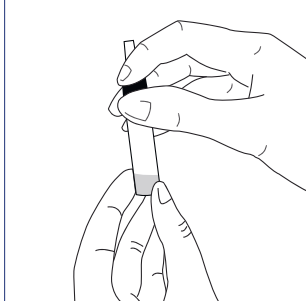


**1** Avaa musta korkki ja laita annospullo pystyyn tasaiselle vaakasuoralle pinnalle.

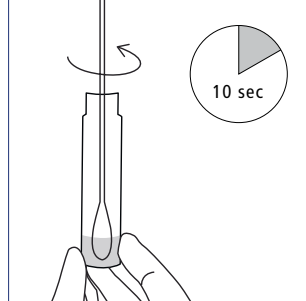

**2** Laita vanupuikko annospulloon ja sekoita **10 sekuntia**. Purista pullon kyljistä, jotta vanupuikosta irtoaa tehokkaasti mahdollisimman paljon nestettä ja sitten hävitä vanupuikko tai katkaise sen kärki pulloon.



**3** Sulje pullo korkilla ja ravista näytepulloa. Kierrä auki näytepullon ylempi osa (läpinäkyvä korkki).

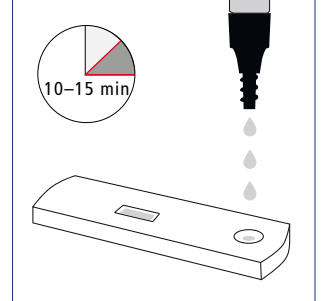


**4** Pidä pulloa pystysuorassa ja lisää 3 pisaraa liuosta testilaitteen pyöreään näytekaivoon. Lue tulos **10 minuutin** kuluttua. Älä lue tulosta 15 minuutin jälkeen.

## Varotoimet ja näytteenotto

- Vain ammattimaiseen in vitro -diagnostiikkaan.
- Pakkaus tulee säilyttää kuivassa tilassa 2–30°C lämpötilassa.
- Kasetteja tulee suojata kosteudelta. Kun foliopussi on avattu, testi tulee tehdä 1 tunnin sisällä.
- Anna testipakkauksen ja näytteiden saavuttaa huoneenlämpö ennen testausta.
- Käytä steriiliä nailonvanupuikkoa näytteen keräämiseen emättimen seinästä. Avaa vanupuikkopussi ja laita vanupuikko emättimeen (5 cm syvyydelle) 1 minuutiksi.
- Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tähystintä ja emättimen eritettä voidaan kerätä jättämällä vanupuikko kontaktiin emättimen seinän kanssa posterior fornixin tasolle 15 sekunnin ajaksi.


Tutustu  
käyttöohjeeseen  
ennen testin  
suorittamista.

# Biosynex Amnioquick Duo +

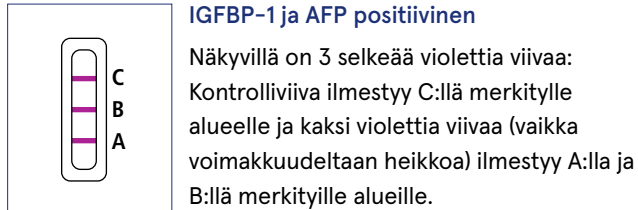


## IGFBP-1 ja AFP positiivinen

Näkyvillä on 3 selkeää violettiä viivaa: Kontrolliviiva ilmestyy C:llä merkitylle alueelle ja kaksi violettiä viivaa (vaikka voimakkuudeltaan heikkoa) ilmestyy A:lla ja B:llä merkityille alueille.

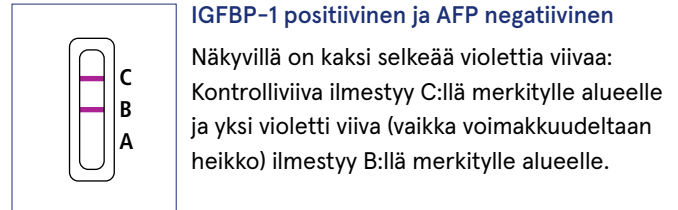


## IGFBP-1 positiivinen ja AFP negatiivinen

Näkyvillä on kaksi selkeää violettiä viivaa: Kontrolliviiva ilmestyy C:llä merkitylle alueelle ja yksi violetti viiva (vaikka voimakkuudeltaan heikko) ilmestyy B:llä merkitylle alueelle.

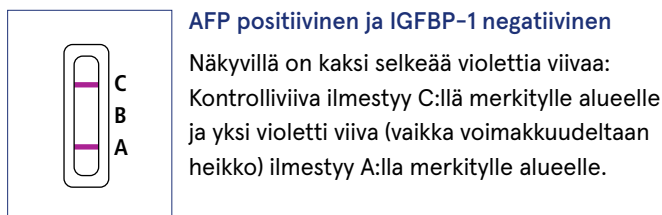


## AFP positiivinen ja IGFBP-1 negatiivinen

Näkyvillä on kaksi selkeää violettiä viivaa: Kontrolliviiva ilmestyy C:llä merkitylle alueelle ja yksi violetti viiva (vaikka voimakkuudeltaan heikko) ilmestyy A:lla merkitylle alueelle.

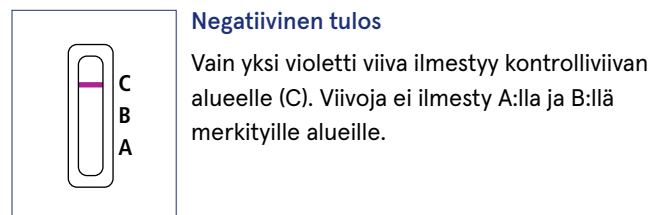

## Negatiivinen tulos

Vain yksi violetti viiva ilmestyy kontrolliviivan alueelle (C). Viivoja ei ilmesty A:lla ja B:llä merkityille alueille.

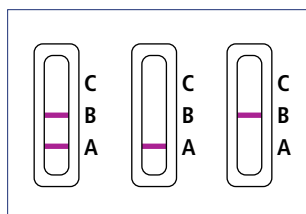

## Virheellinen tulos

Kontrolliviiva ei tule näkyviin.  
Tarkista testimenetelmä ja toista testi. Jos ongelma ei poistu, lopeta testipakkauksen käyttö.

## Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi

050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy,  
puh. 020 112 1510 tai  
asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi

Tuote	Tuotenro.	Tilausno., Mediq Suomi
Biosynex Amnioquick Duo +, 10 testiä	150919	1702255