




Nova StatStrip Glucose and β -Ketone Hospital Meter

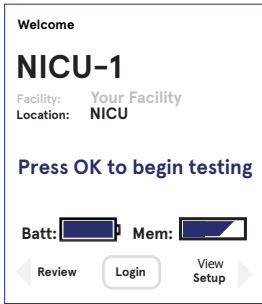


1 Paina [Kirjaudu sisään \(Login\)](#) ja skanna tai kirjoita Käyttäjätunniste. Paina [Hyväksy](#).

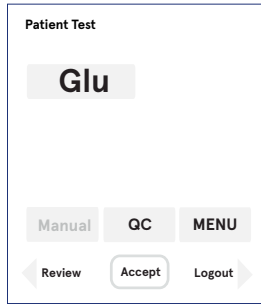


2 Vaihda kontrollilimittaukseen painamalla QC tai paina [Hyväksy](#) suorittaaksesi potilastestin.

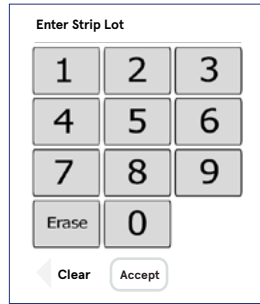


3 Lue testiliuska-purkin viivakoodi ja paina [Hyväksy](#).

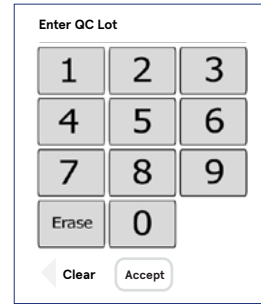


4 Skanna tai kirjoita potilastunniste tai lue kontrollipullon eränumero. Paina [Hyväksy](#).

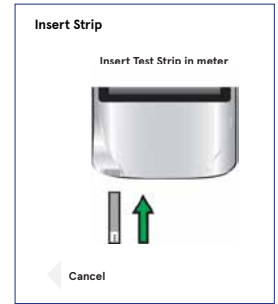

5 Laita testiliuska laitteeseen.

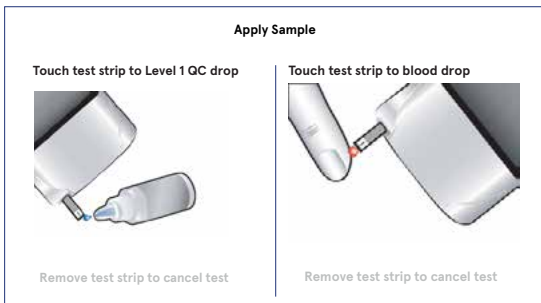

6 Kosketa testiliuskaa kontrolliliuksella tai potilasnäytteellä. Pidä mittari tasaisella alustalla tai pystyssä. Ravista kontrollipulloa varovasti ennen käyttöä. Älä käytä ensimmäistä pisaraa. **Huom: Älä päästä näytemateriaalia testiliuskaporttiin.**

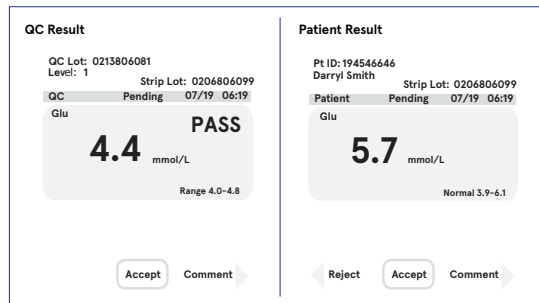

7 Laite näyttää tuloksen. Potilaan testitulos voidaan hyväksyä painamalla [Hyväksy](#)-painiketta. Painamalla [Hylkää](#)-painiketta tulos voidaan hylätä ja viesti voidaan lisätä tulokseen [Viesti](#)-painikkeella. Kontrollimittauksen QC-tulos näytetään [Läpi](#) tai [Hylätty](#) ilmoituksella.

Käytä mittarin takaosassa olevaa poistonappia poistaaksesi käytetyn liuskan.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

Mittarilla voi olla lisäominaisuuksia käytössä.

Nova StatStrip Glucose and β -Ketone Hospital Meter



- Kaikille terveydenhoitoalan ammattilaisille.
- Aseta mittari telakointiasemaan, kun sitä ei käytetä.
- Puhdista 70 %:lla isopropyylialkoholilla, 10 %:n laimennuksella kaupallista laatua olevalla natriumhypokloriitilla tai kaupallisilla pintapuhdistusvalmisteilla.
- Älä suihkuta nestettä suoraan mittariin tai upota sitä nesteeseen.

Nova StatStrip glukoosi ja β -ketoni kontrollit

- Säilytä kontrollipulloa tiiviisti suljettuna alle 30 °C:ssa
- Älä säilytä jääkaapissa tai jäädytä.
- Avattu kontrolli säilyy enintään 3 kuukautta tai viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka.

NovaStatStrip glukoosi ja β -ketoni testiliuskat

- Säilytä liuskoja 15–30 °C:ssa.
- Käytä liuskat viimeisen käyttöpäivään mennessä tai glukoositesti 180 päivän kuluessa testiliuskapurkin avaamisesta ja β -ketoniliuskat 90 päivän kuluessa avaamisesta.



Näyttemateriaali

- Pese potilaan kädet tai puhdista sormi alkoholilla ja kuivaa huolellisesti ennen näytteen ottamista.
- Testiliuska on täytettävä yhdellä kertaa. Älä lisää näytettä testiliuskan päälle.
- Näytemuoto: kokoveri – sormenpääkapillaariverinäyte, laskimo- ja valtimo kokoveri.
- Sopii myös vastasyntyneiden verinäytteille sekä potilaille, jotka saavat intensiivistä lääkettä.
- Sopivat antikoagulantit: natrium-, litium- ja ammoniumhepariini.

Vianetsintä



Lämpötila: Mittari toimii vain lämpötila-alueella 1 °C–40 °C. Palauta mittari ympäristöön, jossa lämpötila-alue on 1 °C–40 °C.



Virtausvirhe: Näyte lisättiin testiliuskaan väärin. Toista testi uudella testiliuskalla. Jos virhekoodi ei poistu, suorita testi käyttämällä vaihtoehtoista menetelmää.



Siirto epäonnistui: Palvelin kieltäytyy ottamasta yhteyttä mittarin kanssa tai yhteys palvelimeen on katkennut. Tarkista verkkoasetukset, verkon tila tai ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.



Siirto epäonnistui: Mittari irroitettiin telakasta ennenkuin tiedonsiirto oli valmis. Telakoi mittari uudelleen.



Analyyssi peruutettu: Testi on peruutettu, toista testi uudella liuskalla. Jätä testiliuska paikoilleen, kunnes tulos näkyy näytöllä.

Virheellinen näyte: Laita laitteeseen uusi testiliuska ja suorita testi uudelleen. Jos virhekoodi ei poistu, suorita testi uudella testiliuskalla toisesta purkista tai vaihtoehtoisella menetelmällä.

Vaihda liuska: Ilmoitus ilmestyy, kun liuska on laitettu laitteeseen tai ilmestyy analyysin aikana. Aseta uusi liuska ja testaa uudelleen. Jos virhekoodi ei poistu, suorita testi uudella testiliuskalla toisesta purkista tai vaihtoehtoisella menetelmällä.

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / 050 380 9684

Tilaukset: tilaukset@aidian.fi / 050 381 5198

www.aidian.fi

Tuote	Tuotenro.	Tilausno.
Nova Statstrip Glu Ket Meter	53712	154722
Nova Statstrip-Glu Ket Meter Wifi 1.86	54796	154767
Nova Statstrip Glucose Test Strips, 100 testiä	42214	154727
Nova Statstrip Ketone Test Strips, 50 testiä	46951	154726
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 1	46947	154725
Nova Statstrip-Glu Ket Control Level 2	46948	154766
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 3	46949	154723
Nova Dock Single For Ver-1.75/.86	53400	154724