



Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test


/ Nenänäyte

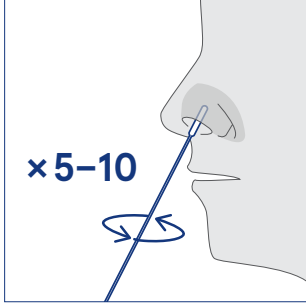


1 Sopiva näytemuoto on nenänäyte. Ota nenänäyte viemällä näytteenottotikku potilaan sieraimen 2 cm syvyyteen (kunnes tunnet vastustusta kuorikossa). Pyöritä näytteenottotikkua **5-10 kertaa** sieraimen sisäpuolta vasten. Käytä samaa tikkua ja toista näytteenotto toisessa sieraimessa.

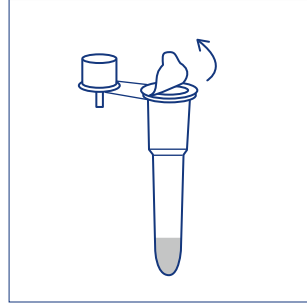


2 Poista uuttoputken suojakalvo. Varo läikyttämästä nestettä.

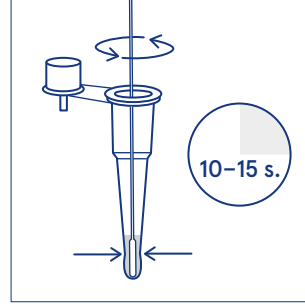


3 Aseta näytteenottotikku uuttoputkeen ja pyöritä sitä **10-15 sekunnin** ajan samalla painaen tikkua uuttoputkea vasten. Purista putken sivuja sormilla pyörittämisen aikana.

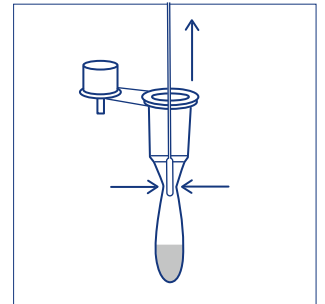


4 Poista näytteenottotikku painaen samalla uuttoputken sivuja pois taaksesi nestettä tikusta.

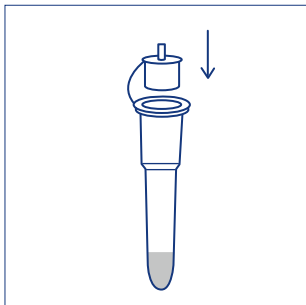

5 Laita uuttoputkeen tippäkärki.

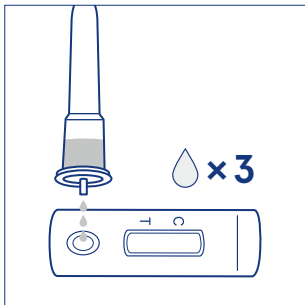

6 Pidä uuttoputkea pystyasennossa, purista putken seinämää ja lisää **3 tippaa** uutettua näytettä testin näytekuppaan. Vältä kuplia tiputtelun aikana.

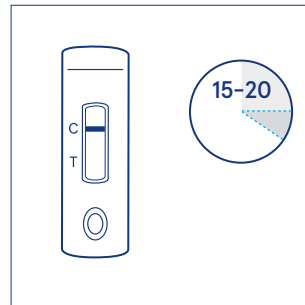


7 Testin tulos on luettavissa **15 minuutin** kuluttua. Tulos tulee tulkita 20 minuutin kuluessa.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test


/ Nenänäyte

Tulosten tulkinta

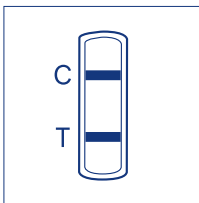


Positiivinen tulos

Punainen viiva ilmestyy kontrollialueelle (C) sekä testialueelle (T). Tämä osoittaa että näytteessä on koronavirus (SARS-CoV-2) antigeenejä yli testin toteamisrajan. Mikä tahansa näkyvä viiva testialueella tulee pitää positiivisena tuloksena.

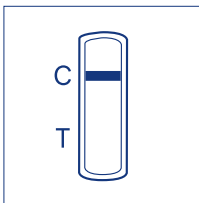

Negatiivinen tulos

Punainen viiva ilmestyy vain kontrollialueelle (C). Testialueella (T) ei ole punaista viivaa. Tämä tarkoittaa, että näytteessä ei ole koronavirus (SARS-CoV-2) antigeeniä tai koronaviruksen (SARS-CoV-2) antigeenitaso on toteamisrajan alapuolella.

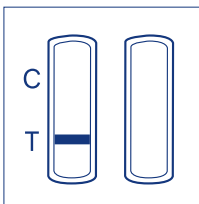

Virheellinen tulos

Tulos on virheellinen mikäli punaista viivaa ei ilmesty kontrollialueelle (C). Virheellinen tulos voi johtua virheellisestä menettelystä tai testikasetista. Suorita uusi testi uusilla komponenteilla.

Kustannustehokas ja nopea testi SARS-CoV-2 antigeenin havaitsemiseen nenänäytteestä

Erinomainen suorituskyky

- Nenänäytteen herkkyys **93,5 %** ja tarkkuus **99,3 %** verrattuna PCR testiin

Helppokäyttöisyys

- Sopii nenänäytteille
- Vain **muutama vaihe** näytteestä tulokseen
- Kaikki tarvittavat **reagenssit sisältyvät pakkaukseen**, mukaan lukien näytteenottotikut
- Säilytys huoneenlämmössä (2–30°C)

Varotoimet

- Testikasetin, näytteen ja puskurin tulee olla huoneenlämpöisiä ennen testaamista.
- Alumiinipussin avaamisen jälkeen, testikasetti tulee käyttää mahdollisimman pian, enintään tunnin sisällä avaamisesta.

Näytteiden säilytys

- Jos välitön testaus ei ole mahdollista, näytteenottotikku voidaan säilyttää steriilissä muoviputkessa 2–8°C:ssa 24 tunnin ajan.
- Uutettu näyteliuos säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia 2–8°C:ssa.

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / 050 380 9684

Tilaukset: tilaukset@aidian.fi

www.aidian.fi

Tuote

Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test, 20 testiä

Tuotenumero

154980

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.