

Tehokasta testausta Ecotest COVID-19 kotitestillä




Heti käyttövalmis ja nopea

Ecotest COVID-19 antigeenitesti on helppo ottaa mukaan ja tehdä missä vain. Testi on nopea tehdä ja vaatii vain muutaman vaiheen. Testi on yksittäispakattu ja pakkaus sisältää kaiken tarvittavan testin tekoa varten.


Helppokäyttöinen

Paksu näytteenotin vähentää epämukavaa tunnetta näytettä ottaessa ja tekee näytteen keräämisestä tehokasta. Näytteenottokynän painaminen näytteenoton jälkeen kiinni korkkiin eristää näytteen ja suljettu systeemi vähentää kontaminaatoriskiä. Testi on lisäksi turvallinen hävittää, sillä korkki sisältää virusta inaktivoivaa puskuriliuosta.


Vain kolme vaihetta!

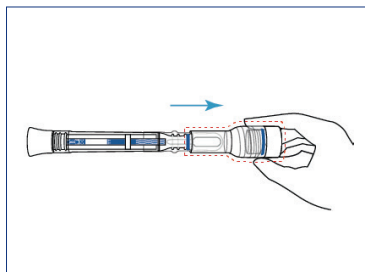

1. Avaa näytteenottokynän korkki ja poista suojatulppa näytteenottimen päästä.

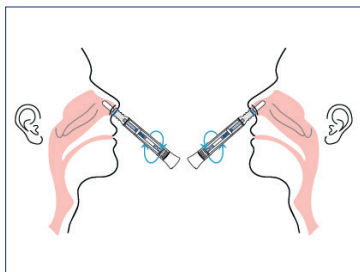

2. Ota näyte pyörittämällä näytteenotinta viisi kertaa kummassakin sieraimessa.

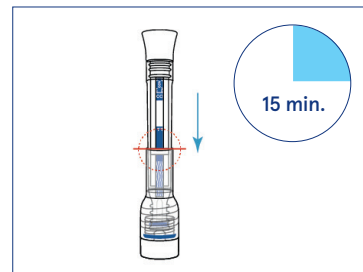

3. Paina näytteenottokynä takaisin korkkiin. Tulokset ovat luettavissa **15 minuutin** kuluttua.

2-18-vuotiaille lapsille testin voi tehdä aikuisen avustamana tai aikuisen valvonnassa. Testi ei sovellu alle 2-vuotiaille.

Pikatesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä, eikä se vapauta tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksistä tai karanteenista.

Aidian Oy

info@aidian.fi / +358 10 309 3000

tilaukset@aidian.fi

www.aidian.fi

Ecotest COVID-19 Ag Pen Self-test Nasal

Pakkauskoko	Tilausnumero
1 kpl	155083
5 kpl	155076

Katso [video](#) testin suorittamisesta.