




QuikRead go[®] CRP & CRP+Hb

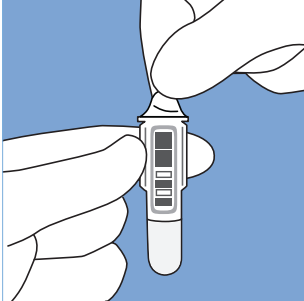


1 Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

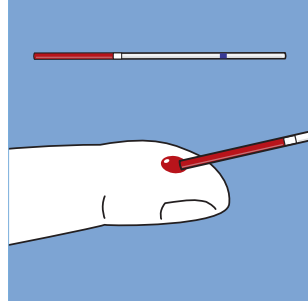

2 Laita mäntä kapillaarin sinisellä merkityyn päähän. Ota näytettä (20 µl) kapillaarin valkoiseen "stopperiin" saakka. Varmista, ettei kapillaarissa ole ilmakuplia. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta.

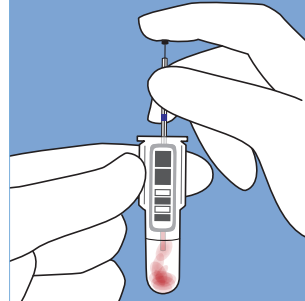


3 Lisää näyte (20 µl) kyvetin puskuriliuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjäntyi kokonaan.

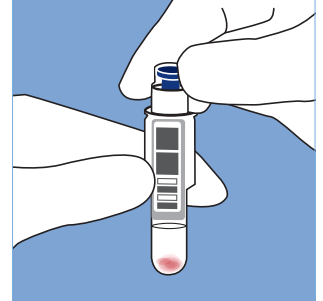

4 Sulje kyvetti huolellisesti reagenssikorkilla. Älä paina korkin sinistä sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



5 Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä "Mittaus".

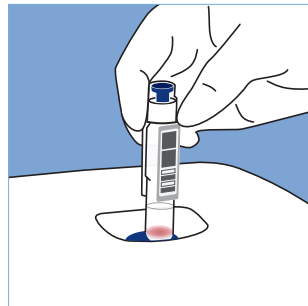

6 Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.



7 Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta. QuikRead go CRP+Hb -testin Hb-tulos näkyy CRP-tuloksen alapuolella.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

QuikRead go[®] CRP & CRP+Hb



Reagenssi-
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–8 °C:n lämpötilassa:
pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka



Reagenssi-
korkit

2–8 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka
18–25 °C: **1 kuukausi** (7,5 h/vrk 18–25 °C ja muun ajan vrk:sta säilytys
2–8 °C): **3 kuukautta**



Kyvetit

Avaamaton foliopussi 18–25 °C:
pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka
Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen:
säilytys 2–8 °C: **6 kuukautta** / säilytys 18–25 °C: **3 kuukautta**



Avattu
kyvetti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista
Testi tulee tehdä **kahden (2) tunnin** kuluessa kyvetin avaamisesta
Näyte säilyy puskuriliuoksessa **kahden (2) tunnin** ajan



CRP-kontrollit

Avaamaton pullo 2–8 °C: **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka
Avattu pullo 2–8 °C: enintään **2 kuukautta**



Hb-kontrolli

Avaamaton pullo 2–8 °C: **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka
Avattu pullo 2–8 °C: enintään **1 kuukausi**

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi

050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510

tai asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi

www.quikread.com

Tuote	Tuotenro	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go CRP, 50 testiä sisältää kapillaarit ja männät	133891	1700552
QuikRead go CRP, 50 testiä	135172	1003422
QuikRead go CRP+Hb, 50 testiä sisältää kapillaarit ja männät	140066	1550522
QuikRead go CRP Control	153764	1703061
QuikRead go CRP Control High	153763	1703062
QuikRead go Hb Control	141154	1550278
QuikRead kapillaarit 20 µl, 50 kpl	67962	67962
QuikRead männät, 50 kpl	67966	67966
QuikRead go -laite	135867	-