



QuikRead go® easy CRP



Anna kontrollin stabiloitua **30 minuuttia huoneenlämmössä** ennen käyttöä.

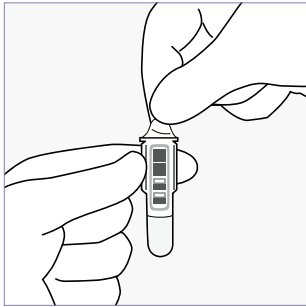



1 Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

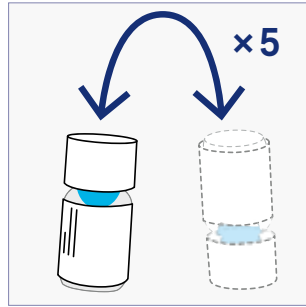


2 Sekoita kontrollia **kevyesti** kääntämällä pulloa 5 kertaa. **Älä ravista**, ettei neste vaahtoa! Mikäli pullon pintaan ilmestyy kalvo, odota kunnes se puhkeaa tai poista se varovasti nukkaamattoman paperin kulmalla.

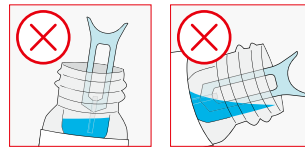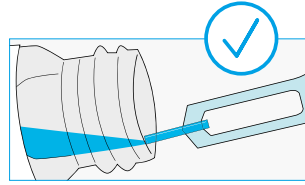


3 Kallista kontrollipulloa siten, että neste saavuttaa pullon kaulan. Ota näyte asettamalla näytteenottimen kärki **aivan nestepinnan alapuolelle**. Täytä näytteenottimen kapillaariosa kokonaan.

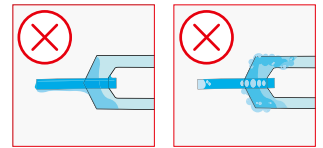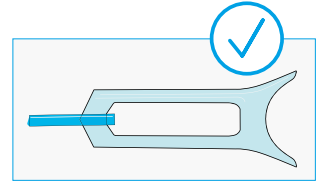


Huom! Älä aseta näytteenotinta vaahtoon tai kontrollipullon sisään. Mikäli näytteenottimessa on ylimääräistä näytettä tai ilmakuplia, niin hävitä näytteenotin ja ota uusi näyte. Älä pyyhi näytteenotinta.

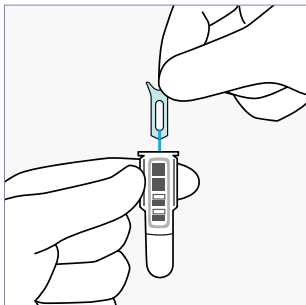


4 Laita näytteenotin kyvetiin 2 minuutin kuluessa näytteenotosta.

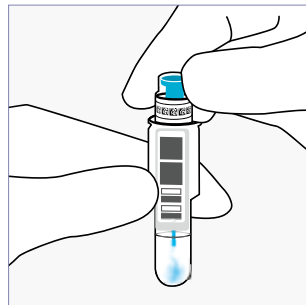

5 Sulje kyvetti tiiviisti easy CRP reagenssikorkilla. Älä paina korkin turkoosia sisäosaa alas. **Suorita testi 15 minuutin kuluessa.**

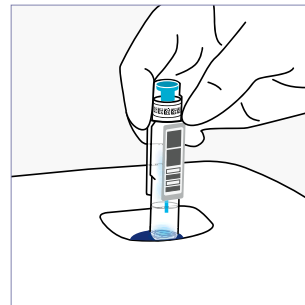

6 Valitse laitteen näytöltä **Kontrollimittaus**. Laita kyvetti laitteeseen, niin että viivakoodi on itseesi päin.

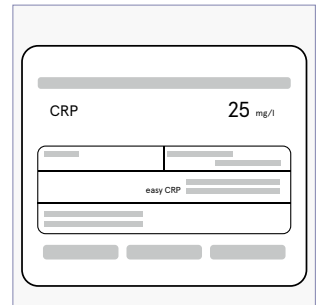

7 Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta. Kontrollin raja-arvot löytyvät pullon päällä olevista merkinnöistä.