




QuikRead go® iFOBT

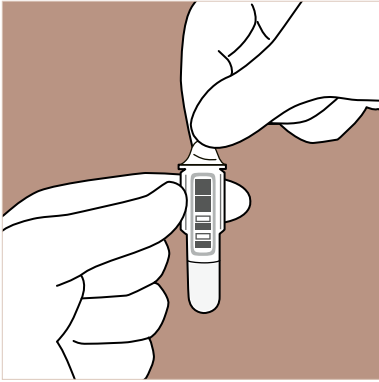

1 Poista kyvetin foliosuojus. Vältä koskemasta kyvetin alaosaa.

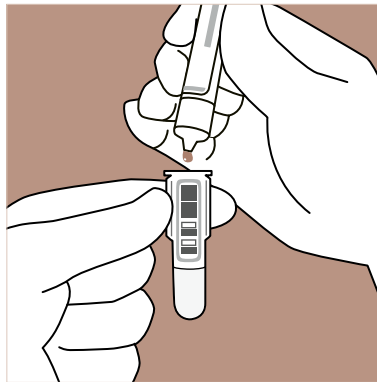


2 Ravista näyteputkea ja katkaise putken kärki. Älä käytä kolmea ensimmäistä tippaa. Lisää seuraavat kolme tippaa näytettä kyvettiin.

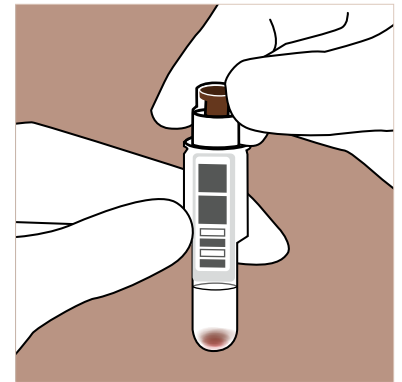


3 Sulje kyvetti tiukasti FOB-reagenssikorkilla. Älä paina alas korkin ruskeaa sisäosaa. Kun näyte on lisätty puskuriliuokseen, sitä voidaan säilyttää enintään kaksi tuntia ennen määrittelyn tekemistä.



4 Valitse **Mittaa** QuikRead go -laitteen näytöstä.

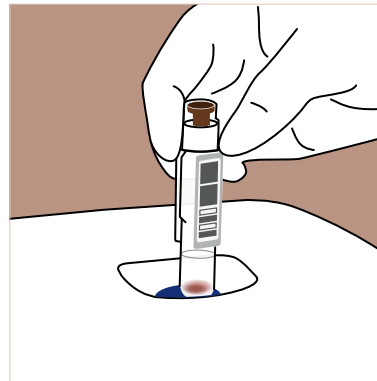

5 Laita kyvetti laitteen mittauskammioon. Viivakoodin tulee osoittaa käyttäjää kohti.

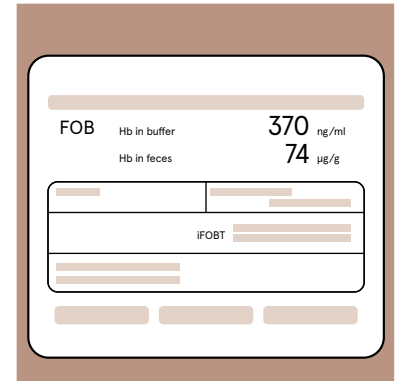

6 Kun mittaus on valmis, tulos näkyy näytössä. Kyvetti nousee mittauskammiosta automaattisesti.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

QuikRead go[®] iFOBT



Reagenssi-
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–8 °C lämpötilassa:
säilyy pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka.



Reagenssi-
korkit

2–8 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka.
18–25 °C: **1 kuukausi** (7,5 h/vrk ja muun ajan vrk:sta säilytys 2–8 °C:
3 kuukautta).



Kyvetit

Avaamattomat pakkaukset säilytys 2–25 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka.
Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen.
Säilytys 2–8 °C: **6 kuukautta** / säilytys 18–25 °C: **3 kuukautta**.



Avattu kyvetti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista.
Testi tulee tehdä **kahden (2) tunnin** kuluessa kyvetin avaamisesta.
Näyte säilyy puskuriliuoksessa **kahden (2) tunnin** ajan.



FOB positiivinen
-kontrolli

Säilytys 2–8 °C kontrollin **vanhenemispäivämäärään** saakka.



QuikRead go
iFOBT kontrolli
Quantitative

Avaamattomana säilytys 2–8 °C:n lämpötilassa kontrollin **vanhenemis-
päivämäärään** saakka.
Avattuna kontrolli säilyy 2–8 °C:n lämpötilassa **yhden (1) kuukauden**.



QuikRead iFOB
Sampling set
-näytteenotto-
putket

Säilytyslämpötila 2–25 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka.
Näytteen säilyvyys puskuriliuoksessa 2–8 °C:ssa **7 vuorokautta**
ja 18–25°C:ssa **5 vuorokautta**.

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi

050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510

tai asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi / www.quikread.com

Tuote	Tuotenumero	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go iFOBT, 50 testiä	151051	1702624
QuikRead FOB Positive Control	06027	06027
QuikRead go iFOBT Control Quantitative	152390	-
QuikRead iFOB Sampling Set -näytteenotto- putket, 50 kpl	151052	1702625
QuikRead go -laite	135867	-