



# Biosynex Strep A


## Pikakäyttöohje

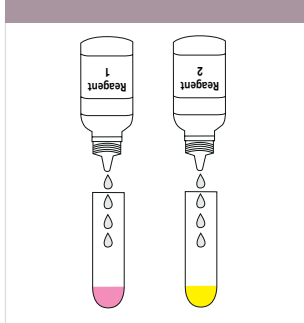


**1** Lisää neljä tippaa reagenssia 1 uuttoputkeen. Reagenssi 1 on väriltään punaista. Lisää neljä tippaa reagenssia 2 uuttoputkeen. Sekoita liuos pyörittämällä varovasti uuttoputkea. Liuoksen väri muuttuu keltaiseksi.

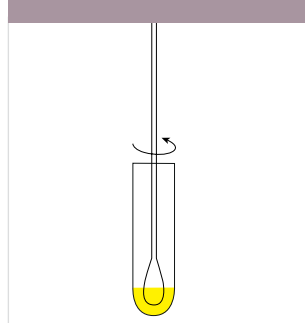

**2** Ota nielunäyte pakkauksen sisältyvällä näytteenottotikulla ja laita se keltaista liuosta sisältävään uuttoputkeen. Pyöritä tikkua 15 kertaa putken pohjaa vasten voimakkaasti sekoittaen.

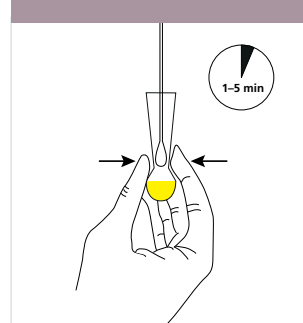


**3** Purista neste pois näytteenottotikun päästä pyörittämällä näytteenottotikkua putken sisäpintaa vasten ja puristamalla putkea samalla, kun vedät näytteenottotikun pois putkesta. Hävitä näytteenottotikku. Inkuboi liuosta vähintään yhden (1) minuutin ajan, mieluummin 5 minuuttia.

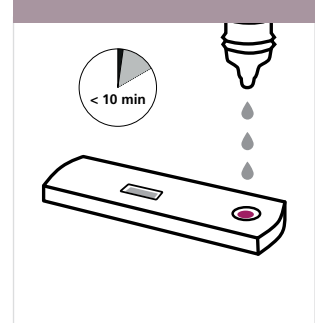


**4** Laita uuttoputkeen tippakärki. Avaa testikasetin foliopussi ja aseta testikasetti tasaiselle pinnalle. Tiputa uuttoputkesta 3 tippaa liuosta näytkuoppaan. Lue tulokset 5 minuutin kuluttua. Testin tulos tulee tulkita viimeistään 10 minuutin kuluttua.

## Tulosten tulkinta

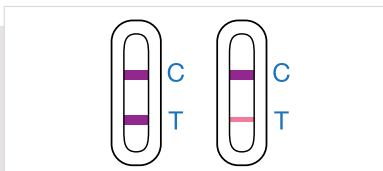


### Positiivinen tulos

Kaksi selvästi erottuvaa punaista viivaa tulee näkyviin. Toinen viiva näkyy testialueella (T) ja toinen kontrollialueella (C).

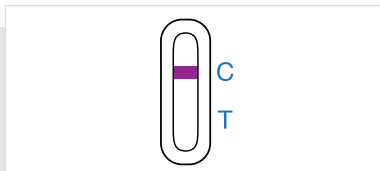

### Negatiivinen tulos

Yksi punainen viiva näkyy kontrollialueella (C). Testin (T) viiva-alueella ei näy viivaa.

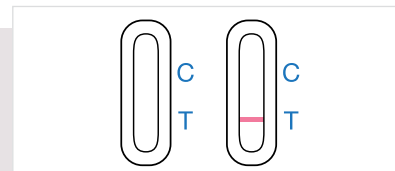

### Virheellinen tulos

Kontrolliviiva ei tule näkyviin. Tarkista testimenetelmä ja toista testi. Jos ongelma ei poistu, lopeta testipakkauksen käyttö.

## Varotoimet, näytteenotto ja näytteen valmistelu

- » Testikasetti tulee säilyttää avaamattomassa pussissa ennen käyttöä.
- » Tarkoitettu ainoastaan ammattilaisten suorittamaan in vitro -diagnostiikkaan.
- » Lämmitä kaikki reagenssit huoneenlämpöiseksi (15–30°C) ennen käyttöä.

- » Säilytä ja kuljeta testikasettia aina 2–30°C:n lämpötilassa.
- » Ota nielunäyte pakkauksen sisältyvällä steriilillä vanutikulla.
- » Testaus tulee suorittaa välittömästi näytteenoton jälkeen. Nielunäytteitä voidaan säilyttää puhtaassa, kuivassa muoviputkessa korkeintaan kahdeksan tuntia huoneenlämmössä (15–30°C) tai 72 tuntia 2–8°C:n lämpötilassa.



Orion Diagnostica Oy  
Koivu-Mankaan tie 6 B, PL 83, 02101 Espoo  
Puh. 010 426 2709, Faksi 010 426 2794,  
www.oriondiagnostica.fi

8062-02FI, 04/2016

Tuote	Tuotenumero	Tilausnumero Mediq Suomi Oy:stä
Biosynex Strep A, 20 testiä	148674	1701572

*Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.*