

QuikRead® CRP esitäytetyt kyvetit

Pikakäyttöohje

1



Valmistelu: Lue CRP magneettikortti. Vedä kortti yhdellä tasaisella vedolla lukijan läpi.

2




Avaa kyvetti. Tarkista, että nestepinta on kahden kyvetissä olevan viivan välissä. Huom! Vältä koskemasta kyvetin alaosaa.

3



Laita mäntä kapillaarin sinisellä viivalla merkittyyn päähän. Ota näytettä kapillaarin valkoiseen 'stopperiin' saakka (20 ul). Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta esim. tufferilla. Lisää näyte kyvetiin painamalla mäntä alas.

4



Sulje kyvetti CRP-reagenssikorkilla. Varo painamasta korkin sinistä sisäosaa alas. Sekoita (ei ylösalaisin) ja tarkista, että liuos on kirkasta. Laita kyvetti laitteeseen.

5



Taustamittauksen jälkeen (enintään 40 s) lisää CRP-reagenssi painamalla korkin sininen sisäosa alas kyvetin ollessa laitteessa.

6



Ota kyvetti laitteesta ja sekoita voimakkaasti kääntelemällä kyvetiä ylösalaisin.

7



Laita kyvetti välittömästi takaisin laitteeseen, kun laite sitä pyytää. Laite mittaa enintään 1 minuuttia. Lue ja kirjaa CRP-tulos ennen kuin poistat kyvetin laitteesta.

Pikakäyttöohjeessa on esitelty QuikRead CRP -testin suorituksen päävaiheet. Tarkemmat ohjeet löytyvät reagenssipakkauksen käyttöohjeesta.

POC



QuikRead® CRP esitäytetyt kyvetit

Reagenssien säilytys



Avaamaton reagenssipakkaus

Säilytys 2–8 °C:
Reagenssipakkauksen
vanhenemispäivämäärään asti.



Reagenssikorkit avaamattomassa tai avatussa putkilossa

Säilytys 2–8 °C: Reagenssipakkauksen vanhenemispäivämäärään asti.

Säilytys 18–25 °C: 1 kuukausi.

Säilytys 18–25 °C: 7,5h/vrk (ja muun ajan vrk:sta säilytys 2–8 °C);
3 kuukautta.



Esitäytetyt kyvetit avaamattomassa foliopussissa

Säilytys 2–25 °C:
Reagenssipakkauksen
vanhenemispäivämäärään asti.



Avattu kyvetti

Avattu kyvetti tulee käyttää **kahden (2) tunnin** kuluessa.
Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista.



Esitäytetyt kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen

Säilytys 2–8 °C: 6 kuukautta ilman foliopussia tai avatussa foliopussissa.

Säilytys 18–25 °C: 3 kuukautta ilman foliopussia tai avatussa foliopussissa.



QuikRead CRP Kontrolli

Säilytys 2–8 °C:
Avaamattomana kontrollin vanhenemispäivämäärään asti ja avattuna kaksi (2) kuukautta.

POC



Lisätietoja: www.oriondiagnostica.fi